

### **Orientações para Lâminas de Medulograma:**

- 1) Secar totalmente as distensões antes de acondicionar as lâminas na caixa de transporte para evitar artefato de hemólise (o ideal é utilizar uma fonte de ar morno).
- 2) Utilizar lâminas limpas com gaze e álcool para prevenir artefato de coloração.
- 3) Identificar as lâminas com iniciais e data de nascimento do paciente na parte fosca (que deve ficar para cima).
- 4) Não distender o aspirado sobre a parte fosca da lâmina.
- 5) Utilizar o primeiro aspirado para uma amostra mais representativa de medula óssea.
- 6) Rolar o fragmento de BMO sobre uma gaze para retirar o excesso de sangue antes de fazer o *imprint*.
- 7) Enviar as informações clínicas e suspeita clínica junto com o material.
- 8) Não expor as lâminas a formol ou outros agentes fixadores, antes ou após a distensão.
- 9) Enviar pelo menos 3 lâminas com a distensão adequada, com presença de grumos para avaliação de reservas de ferro.
- 10) As lâminas devem ter as seguintes formas:

